

# Mund-Nasen-Maske, 3-lagig



<b>Artikelnummer:</b>	3028809
<b>Produktbezeichnung:</b>	Mund-Nasen-Maske (Community Maske)

<b>Klassifizierung:</b>	Geprüft nach EN 14683:2019				
<b>Produktbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Latexfrei</li> <li>- mit leicht modellierbarem Nasenbügel</li> <li>- hautfreundliches Innenvlies</li> <li>- Filtermedium: MikrofaserVLies, im Meltblown-Verfahren hergestellt</li> </ul> <p><u>Material:</u> 1. Lage: Vlies, weiß 2. Lage: Polypropylen 3. Lage: Vlies, blau</p> <p><u>Maße:</u> 17,5 x 9,5cm - nicht steril</p>				
<b>Farbe:</b>	Blau				
<b>Logistische Daten:</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Farbe</b>	<b>Menge</b>	<b>Verpackung</b>	<b>GTIN</b>
	3028809	blau	50 Stk.	1 Box	4260458330555
	3028809	blau	2000 Stk.	40 Boxen	8414806773563
		<u>Bruttogewicht:</u>	8 kg		
		<u>Nettogewicht:</u>	7,5 kg		
		<u>Maße Umkarton:</u>	51,5 cm x 38,5 cm x 34 cm		
<b>Haltbarkeit:</b>	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 3 Jahre				

## BITTE BEACHTEN BEI ERSTENTNAHME UND GEBRAUCH

### Anweisung zum Gebrauch von Mund-Nasen-Schutz:

1. Bitte öffnen Sie den Polybag mit sauberen und gewaschenen Händen vollständig und legen Sie die entpackten Masken zurück in die Verpackung. Bei Entnahme der einzelnen Masken, nicht an den Ohr-Bändern ziehen und beachten Sie den Hinweis zum Gebrauch von Mund-Nasen-Schutz. Zu starkes ziehen, kann zum abreißen der Ohr-Bänder führen.
2. Sicherstellen, dass der Nasenbügel auf der oberen Seite ist und am Nasenrücken anliegt. Dann mit leichten Druck an den Nasenrücken festdrücken (Wichtig für Brillenträger)
3. Die seitlichen Bänder hinter die Ohren klemmen und den Nasenbügel endgültig andrücken. Maske dem Gesicht entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Hygienehinweise. Die Masken bitte sauber und trocken lagern.



Manufacturer: Shanghai Seven Sense Foods Limitid  
Add: Tower 1, No.9 Song Qiu Road, Qing Pu, Shanghai  
Tel: 0591-87712836  
Email: [tpk@topkeeping.cc](mailto:tpk@topkeeping.cc)