


Mund-Nasen-Maske, 3-lagig

bakterieller Schutz $\geq 95\%$



Artikelnummer:	3028809
Produktbezeichnung:	Mund-Nasen-Schutz

Klasse 1:	Geprüft nach EN 14683:2019 																				
Produktbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Latexfrei - mit leicht modellierbarem Nasenbügel - hautfreundliches Innenvlies - Filtermedium: Mikrofaservlies, im Meltblown-Verfahren hergestellt <p><u>Material:</u> 1. Lage: Vlies, weiß 2. Lage: Polypropylen, thermisch gebunden (Melt-Blown Verfahren) 3. Lage: Vlies, blau</p> <p><u>Maße:</u> 17,5 x 9,5cm - nicht steril - nicht für den medizinischen Bereich</p>																				
Farbe:	Blau																				
Logistische Daten:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Farbe</th> <th>Menge</th> <th>Verpackung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>blau</td> <td>50 Stk.</td> <td>1 Pack</td> </tr> <tr> <td></td> <td>blau</td> <td>500 Stk.</td> <td>10 Pack</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"><u>Bruttogewicht:</u> 2,4 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"><u>Nettogewicht:</u> 2,0 kg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Farbe	Menge	Verpackung		blau	50 Stk.	1 Pack		blau	500 Stk.	10 Pack		<u>Bruttogewicht:</u> 2,4 kg				<u>Nettogewicht:</u> 2,0 kg		
	Farbe	Menge	Verpackung																		
	blau	50 Stk.	1 Pack																		
	blau	500 Stk.	10 Pack																		
	<u>Bruttogewicht:</u> 2,4 kg																				
	<u>Nettogewicht:</u> 2,0 kg																				
Haltbarkeit:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 3 Jahre																				

BITTE BEACHTEN BEI ERSTENTNAHME UND GEBRAUCH

Anweisung zum Gebrauch von Mund-Nasen-Schutz:

1. Bitte öffnen Sie den Polybag mit sauberen und gewaschenen Händen vollständig und legen Sie die entpackten Masken zurück in die Verpackung. Bei Entnahme der einzelnen Masken, nicht an den Ohr-Bändern ziehen und beachten Sie den Hinweis zum Gebrauch von Mund-Nasen-Schutz. Zu starkes ziehen, kann zum abreißen der Ohr-Bänder führen.
2. Sicherstellen, dass der Nasenbügel auf der oberen Seite ist und am Nasenrücken anliegt. Dann mit leichten Druck an den Nasenrücken festdrücken (Wichtig für Brillenträger)
3. Die seitlichen Bänder hinter die Ohren klemmen und den Nasenbügel endgültig andrücken. Maske dem Gesicht entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Hygienehinweise. Die Masken bitte sauber und trocken lagern.



Hergestellt / MFD: 2020-05-12
Lagerfähig bis / EXP: 2023-05-12
LOT: MAYSH001